

プーリーパワーブラック

PPPBB

ピー ピー ピー

PULLY POWER BLACK



Orthopedic & Prosthetic Devices
OBARA KOGYO CO.,LTD.
www.obara-kogyo.jp



腰痛シャットアウト!



1. 本体を左右に広げて、持ち手をメッシュ上のベルクロマジックに仮に止めておきます。

2. 持ち手が左側にくるように腰に巻き、正面で右側が上になるように止めます。

3. プーリーパワーユニットが背骨の中心にくるように調整します。

4. 固定する位置が決まったら、持ち手をベルクロマジックから離し、好みのサポート感が得られるまで引張り、ベルクロマジックにとめます。

5. 緩めたい時は、持ち手をベルクロマジックから離し、任意の場所にとめます。

プーリーパワーブラックは腰痛でも活動範囲を広げたい方のためにデザインされています。

犬の散歩、立ち仕事、洗車、ドライブ等の日常の活動から各種スポーツ、乗馬、ハイキング、重量挙げのような激しい活動まで、プーリーパワーブラックを使用することで、ストレスや負担を腰に感ずることなく活動的に過ごす事ができます。

プーリーパワーブラックはもともと整形外科医のニーズにあうようにデザインされ、プーリーシステムが採用されています。

また、このブレースは特に運動選手のニーズに合うようにデザインされています。

特徴： ●紐はパラシュート仕様の三重編み：

●通気性の良いナイロンメッシュ

●任意のタイミングで締め付け具合を調整可能

ウエストサイズ(cm)

S	M	L
63~76	76~89	89~102

生産国：韓国

材質：ナイロンメッシュ、ナイロン樹脂

¥14,800-(税別)



株式会社 小原工業

〒158-0097 東京都世田谷区用賀2-18-9
TEL.03-3700-4631 FAX.03-3708-2511
E-mail:s.akiyama@obara-kogyo.jp • Website : www.obara-kogyo.jp