



ハーベストクラフト株式会社は「医療・介護現場のあったらいいな」を考える会社です。



こんな感じで
重い足を容易に掴め
介護負担を軽減!



介護される側からの発想で生まれた

持ち手つきサポーター

ヨイショっと!

特許出願済み

本製品はご自身によるトレーニング、動作の補助および介護者の介護補助を目的としたサポーターです。

ベッド介助・車椅子移動

重い足を容易にサポート



自主リハビリサポート

自力で様々な筋肉を鍛える



トイレ介助・排泄エイド

要介護者の意図を活かす



医学博士 土井 淳

自分自身が大きな病気を患い、入院した病院のベッドの上から動けなくなった経験があります。

「病気」になるのは仕方がないけれど、気持ちまで「病人」になってしまっはいけない。出来る限り自分で出来ることは自分でやらなければ本当に「病人」になってしまう。

そうならない為にはどうしたらよいか?を考えていたら「ヨイショっと!」のデザインが生まれました。

「ヨイショっと!」を使って健康寿命を延ばしましょう。



【付属ベルト】(ベルトありタイプ)
本体と手で把持する部分の調節を行います。

販売価格

ベルトなしタイプ ¥6,600 (税抜き ¥6,000)
ベルトありタイプ ¥8,800 (税抜き ¥8,000)




「医療・介護現場のあったらいいな」を考える

ハーベストクラフト株式会社

〒195-0072 東京都町田市金井6-1-6

ハーベストクラフト

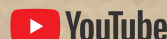

使用方法

[動作補助]

使用者が持ち手（付属ベルト）をつかみ、動かしたい方向へその部位を移動させてください。

[介護補助]

介護者が持ち手（付属ベルト）をつかみ、動かしたい方向へその部位を移動させてください。


[トレーニング]

理学療法士などの有識者の指導のもとで、使用者が持ち手（付属ベルト）をつかみトレーニングをおこなってください。

装着方法

- ① 装着したい場所（イラスト例は太もも）にサポーター本体をあてます。
- ② サポーター本体が交差するように巻き付けてください。
- ③ グリップ部を軽く引っ張って、面ファスナーを持ち手付近でしっかり固定してください。

※付属ベルト（ベルトありタイプ）を使用する場合、太ももの裏側に持ち手が来て付属ベルトを太もも前面に回し装着すると、サポーター前面が太ももの裏側を全体的に包み込むことで安定感が増します。付属ベルトの長さを調整することができます。

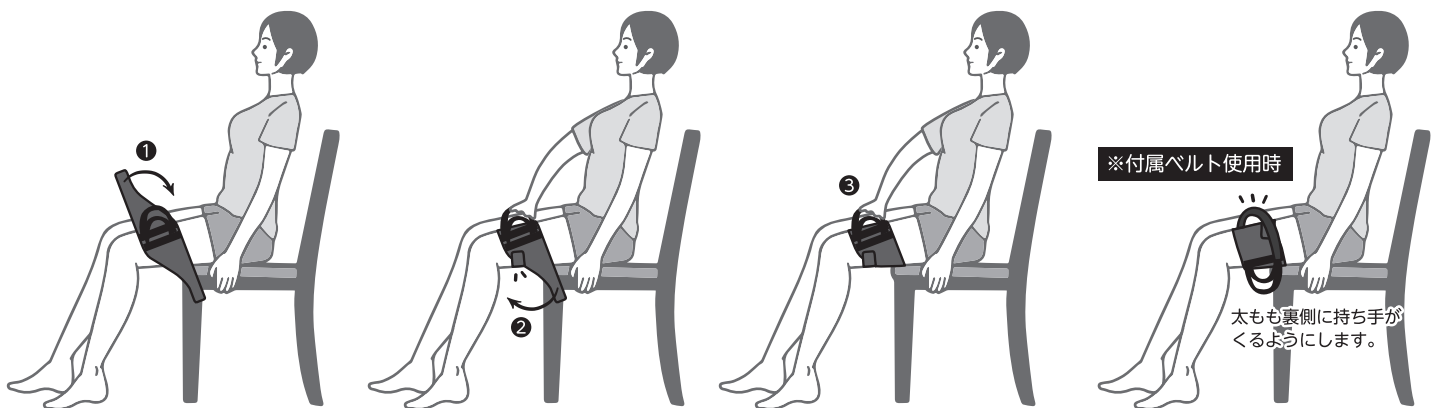

ご注文シート FAX:042-649-3492

お名前	フリガナ		
ご住所			
お電話		F A X	
希望個数	ベルトあり	個 /	ベルトなし 個

※数日以内に返信がない場合、お手数ですがご一報賜りますようお願いいたします。

販売・お問い合わせ先：リプト株式会社
東京都八王子市明神町4丁目9番1号

電話番号：042-649-3491

URL <https://livet.jp>

